

Kaminstructie voor de Prioderm luizen- en netenkam

Stap 1: Controleer op hoofdluizen en neten met de plastic zijde


Gebruik voor de controle op hoofdluizen en neten de plastic zijde van de Prioderm Luizen- en netenkam. Het wordt aangeraden om deze controle wekelijks uit te voeren.

Kaminstructie Prioderm Luizen- en netenkam - plastic zijde:

- Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier, een wit laken of een wasbak.
- Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten vaak hoofdluizen. Let vooral op het haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony.
- Kijk goed of je tijdens het kammen kleine luizenstipjes tegenkomt. Een volwassen hoofdluis is ongeveer 3 mm lang en varieert in kleur van zandkleurig tot bijna zwart.
- Als er tijdens de controle al hoofdluizen uit het haar komen, spoel ze dan weg met water.
- Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen met heet water) om te voorkomen dat je de hoofdluis verspreidt.

Er is alleen sprake van besmetting als je hoofdluizen of levende neten aantreft. Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt, vlak boven de hoofdhuid. Indien er sprake is van een besmetting, ga dan naar stap 2. Heb je geen hoofdluizen en/of neten gevonden? Blijf deze controle dan wekelijks herhalen, dan ben je er bij een hoofdluisbesmetting op tijd bij.

Deze kant is voor controle

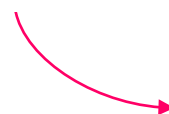

Stap 2: Verwijder hoofdluizen en neten met de metalen zijde

Het verwijderen van de neten is een lastig karwei omdat de neten met een sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Ook als de neet dood of uitgekomen is, blijft het omhulsel stevig aan het haar vastzitten. Je kunt Priolox Foam gebruiken om de lijmstof op te lossen, waardoor je de neten makkelijker uit het haar kunt kammen. Met de dubbele rij metalen tanden van de Prioderm Luizen- en netenkam kam je de hoofdluizen en neten uit het haar.

Kaminstructie Prioderm Luizen- en netenkam - metalen zijde:

Kam (bij een hoofdluisbesmetting) gedurende 14 dagen elke dag het haar met de metalen zijde van Prioderm Luizen- en netenkam.



Deze kant is voor het uitkammen van neten

Ga hierbij als volgt te werk:

- Was het haar eerst met een gewone shampoo, spoel het uit en maak het haar handdoekdroog.
- Breng ruim crèmespoeling of Priolox Foam aan in het haar en spoel dit NIET uit. Gebruik Priolox Foam om het kammen makkelijker te maken en om de neten los te maken van het haar.
- Kam met een gewone kam of borstel de klitten uit het haar.
- Kam het haar lok voor lok vanaf de hoofdhuid naar het einde van de lok met de metalen zijde van de Luizen- en netenkam. Start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor.
- Tip: bij dun haar kan je vóór het kammen een verbandgaasje tussen de tanden van de kam schuiven. Hierdoor krijg je meer grip op de neten. Na het kammen kan de kam gemakkelijk worden schoongemaakt door het gaasje van de kam te schuiven.
- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of je hoofdluizen en/of neten ziet. Spoel gevonden hoofdluizen en/of neten door het toilet of de wasbak.
- Spoel vervolgens de Priolox Foam of de crèmespoeling uit het haar en maak de kam goed schoon.
- Reinig de kam grondig, na iedere controle, om te voorkomen dat je de hoofdluis over brengt. Je kunt de kam 5 minuten uitkoken, desinfecteren met 70% alcohol of 30 minuten in een dichtgeknoopte kussensloop in een hete wasdroger stoppen.